

フェザー® メディカル製品カタログ


替刃式剃毛用レーザー／ディスポガード／ディスポーザブルレーザー／チョコキン／バンデージスニップ／パラダ製品各種



替刃式剃毛用レザー ソフトな肌あたりを実現したハイグレードレザー


分解・組み立てがワンタッチのバネ式ですので、替刃の交換、ホルダーの洗浄が簡単です。替刃は剃毛用ガードブレード、剃毛用ブレードをご使用ください。

- 添付替刃：剃毛用ガードブレード(3枚入)

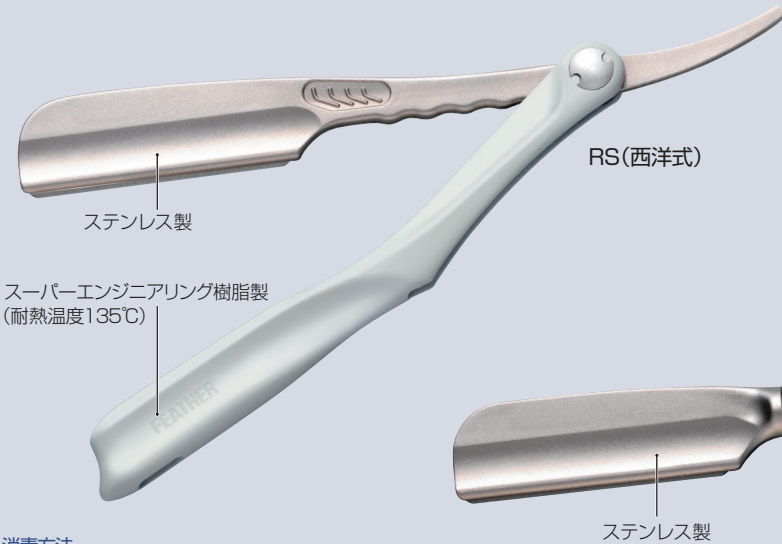

先端の丸みと刃の出がポイント

刀身先端の「丸み」と「刃の出」のバランスが肌への負担を軽減し、今までにないソフトでなめらかな肌あたりの良さを実現しました。(当社比)

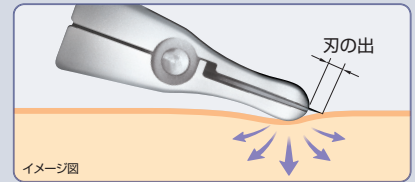

エラストマー樹脂製(耐熱温度135℃)

消毒方法

必ず替刃を外してから行ってください。


| 消毒方法 | |
|----------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> | 煮沸消毒 |
| <input type="radio"/> | オートクレープ処理 |
| <input type="radio"/> | エタノール消毒 ※1 |
| <input type="radio"/> | EQGガス滅菌処理 |
| <input checked="" type="radio"/> | 次亜塩素酸ナトリウム消毒 ※2 |

- 消毒液への長時間の漬け込みは避けてください。
- 誤った消毒方法は、製品に不具合が生じる原因となりますのでご注意ください。
- ※1 消毒用エタノール(76.9~81.4VOL%)を使用してください。
- ※2 次亜塩素酸ナトリウムでの消毒は、長時間にわたるとホルダーが腐食してきますので避けてください。

替刃セット方法

フェザー剃毛用レザーの替刃保持機構は全てバネ式です。本体峰中央(バネ内蔵部)を指でつまみ、替刃セット部を開いてセットします。

- 上向きにして行うと安全にセットできます。
 - 替刃ディスプレイからも直接セットできます。
 - 替刃が正しくセットされているかを確認した上でご使用ください。
- ※ケガをしないよう十分ご注意ください。

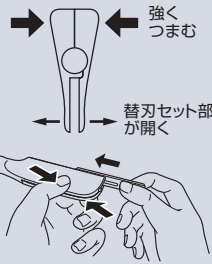


替刃の外し方

刃先を下に向けて本体峰中央(バネ内蔵部)を図のようにつまむと、替刃は自重で落下します。

- 刃先にヒゲかす等が付着したままですと、外しにくくなる場合があります。
- ご使用済の替刃はディスプレイの捨て刃収納部へ入れてください。


※ケガをしないよう十分ご注意ください。

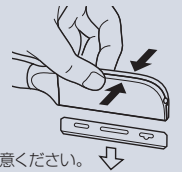

剃毛用ガードブレード

肌当たりがソフトで、安全性の高い半円形ガード付替刃です。刃が肌に強く当たらないので、耐久性にも優れています。

刃長50mm、全体厚0.35mm(刃厚0.15mm、ガード厚0.1mm)
<15枚入>

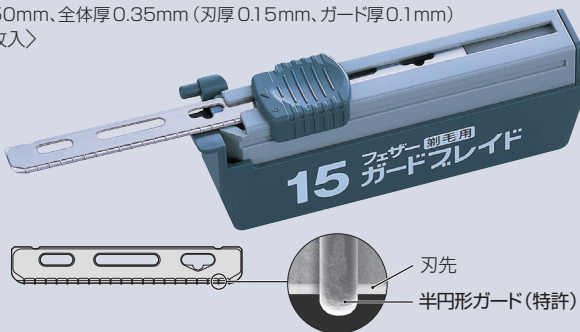

剃毛用ブレード


プラチナコーティングと樹脂コーティング加工されたステンレス刃は、なめらかな剃り味と耐久性に優れています。

刃長50mm、刃厚0.254mm
<10枚入>



ディスポガード

ディスポーザブルタイプの剃毛用カミソリです。ガード付ですので滑らかな剃り味と耐久性に優れています。

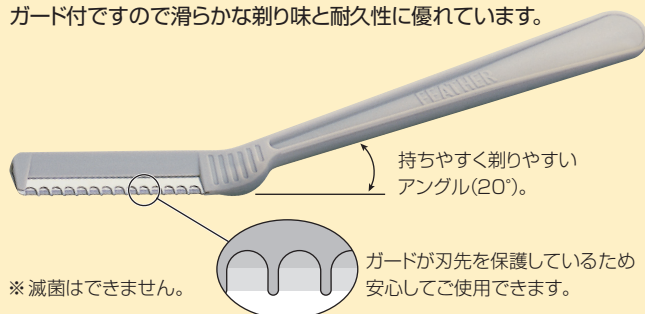

ディスポーザブルレザー

広範囲の剃毛に最適なディスポーザブルタイプの剃毛用T型両刃カミソリです。



チョッキン コアラ/クロス (伸縮性のストラップ付)

粘着テープを切っても、刃がベタつかないフッ素コーティング加工です。刃先は丸くプラスチック製ガード付で、カットする時も安心の設計です。



フッ素コーティング加工

プラスチック製ガード

クリップ式ホルダー付で出し入れもスムーズ。ポケットもいためません。



伸縮性のストラップ



コアラピンク

コアラブルー

コアライエロー

コアラグリーン

クロスピンク

クロスブルー

クロスイエロー

クロスグリーン

バンデージスニップ

やわらかいガーゼから硬い金属板まで対象物を問わずに使用できます。グリップは耐熱性樹脂を使用していますのでオートクレーブ滅菌が可能です。

特殊ステンレス鋼製 (ピラニア刃付)

刃の先端に丸味がありますので、携帯時・使用時に危険がありません。



青

黒

パラダ


使いやすさ、安全性を追求したフェザーパラダシリーズ。医療現場の身だしなみを清潔にサポートします。※滅菌はできません。

ツメキリ

本格的な焼入れと、フェザー独自の刃付加工で小気味よい切れ味をお楽しみいただけます。

最適な刃のオフセット

(噛み合わせの設定)
ツメを切るのに最適なように、上刃と下刃をわずかにずらした精密なオフセット加工をしています。

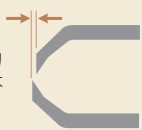

Lサイズ

Sサイズ

オールメタル

ラインナップ (製品全長)
Lサイズ (102mm)
Mサイズ (82mm)
Sサイズ (66mm)
オールメタル (82mm)

ツメヤスリ

1本で2タイプの使い分けが可能な「本格目立て」を両面に採用。「三方向目立て」で形を作り、「二方向目立て」で滑らかに仕上げます。



本格三方向目立て 本格二方向目立て

ツメヤスリのグリップは垂鉛ダイカスト製。程よい重量で安定感があります。

鼻毛カッター


シャープな切れ味と耐久性向上のため、「内刃」「外刃」の双方に焼入れ処理を施しました。



掃除用ブラシ付

耳かき

1本で2タイプの使い分けが可能です。

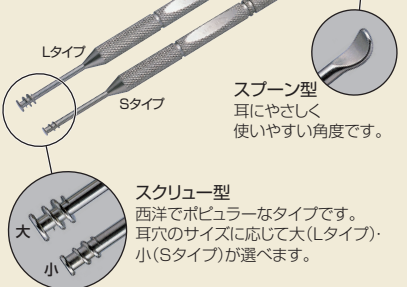

Lタイプ

Sタイプ

スプーン型
耳にやさしく使いやすい角度です。

スクルー型
西洋でポピュラーなタイプです。耳穴のサイズに応じて大(Lタイプ)・小(Sタイプ)が選べます。

パッケージ

台紙付と箱入がご用意です。



台紙付

箱入