


## 「トリミングナイフハンドル F-80HL」について

トリミングナイフハンドル F-80HL は、装着の簡易性、替刃を直接持つ感覚を損なわないような設計としてクリップ方式を採用しております。

その為、使用中にホルダー後方部（クリップ部分）に強く手が触れると、替刃装着部分が開き、替刃がはずれてしまう恐れがあります。

つきましては、必ずご使用の際は、下記イラストのように持ち、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

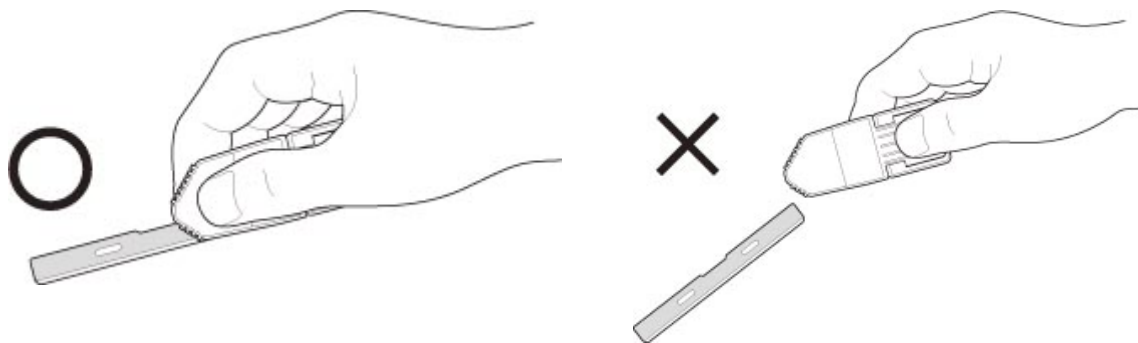

※ホルダーの前方部分をお持ち下さい。また、替刃の向きについてもご注意ください。

尚、上記持ち方が難しい場合は、下記製品をご使用ください。

- ・ トリミングナイフハンドル F - 80ミニ
- ・ トリミングナイフハンドル F - 80P