





フェザー®耳鼻咽喉用替刃メス

鼻用粘膜刀〈K-45R〉

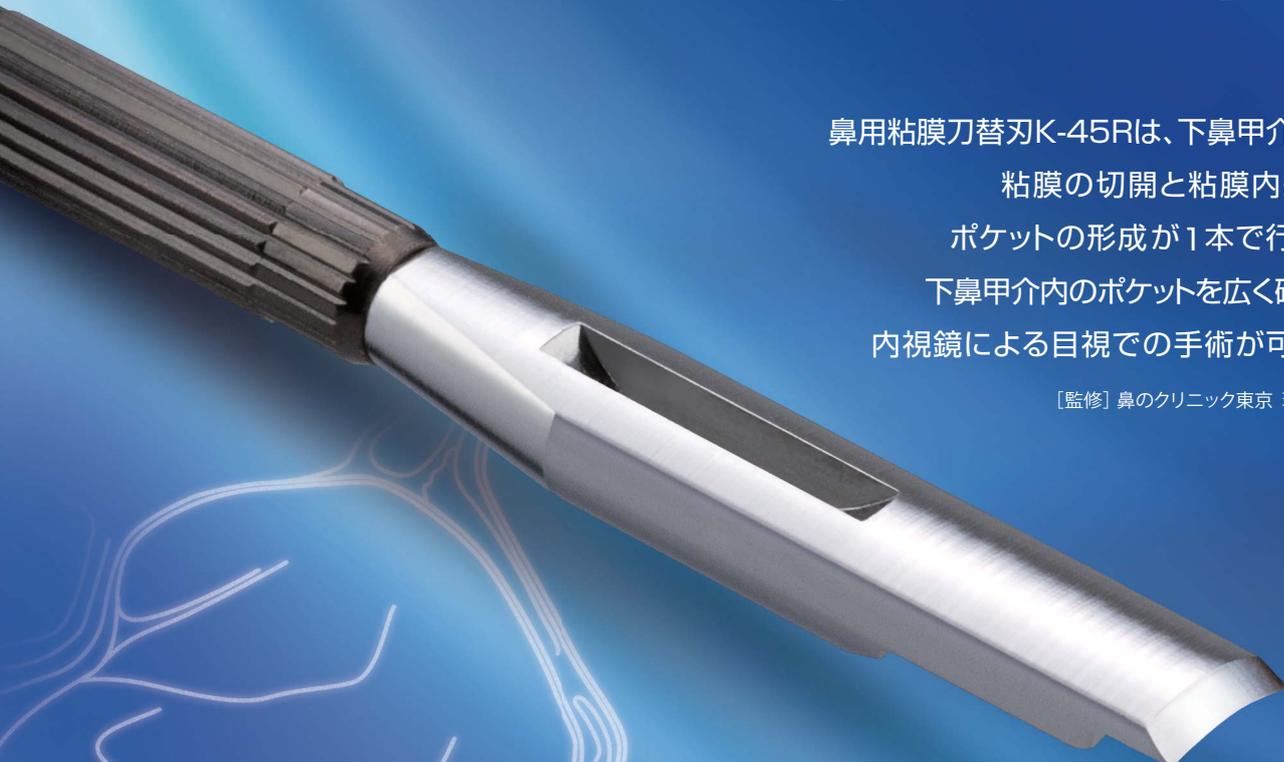


鼻用粘膜刀替刃K-45Rは、下鼻甲介手術において
粘膜の切開と粘膜内組織の剥離や
ポケットの形成が1本で行えるメスです。
下鼻甲介内のポケットを広く確保できるため、
内視鏡による目視での手術が可能となります。


[監修] 鼻のクリニック東京 理事長 黄川田 徹 先生

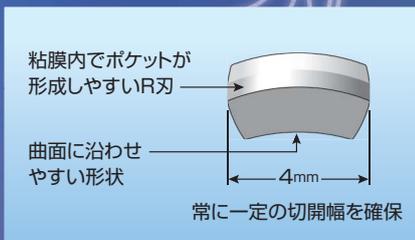

〈K-45R正面図〉

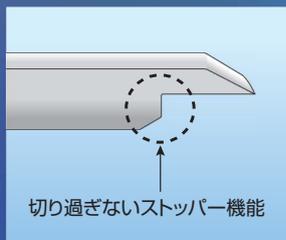

切り過ぎないストッパー機能

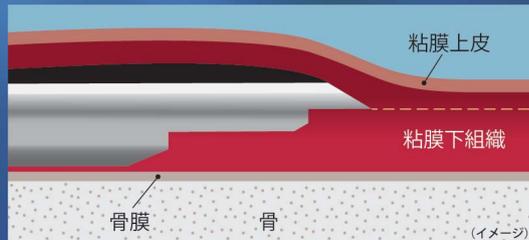

骨膜に沿わせることで、安定的な切開が可能となります。(イメージ)

〈替刃〉 滅菌済/シングルユース

〈フェザー耳鼻咽喉用替刃メス〉 管理医療機器/単回使用メス用刃/製造販売認証番号:219AABZX00269000

品番	形状(原寸大)	販売単位	JANコードナンバー	使用例
K-45R		1箱(5コ入)	 4 902470 149264	下鼻甲介 粘膜切開

〈ハンドル〉


品番	販売単位	JANコードナンバー
NF-175S (フェザー微細手術用替刃メスハンドル)	1本 (ケース入)	 4 902470 067094




フェザー® 耳鼻咽喉用替刃メス 鼻用粘膜刀〈K-45R〉の使用例




1

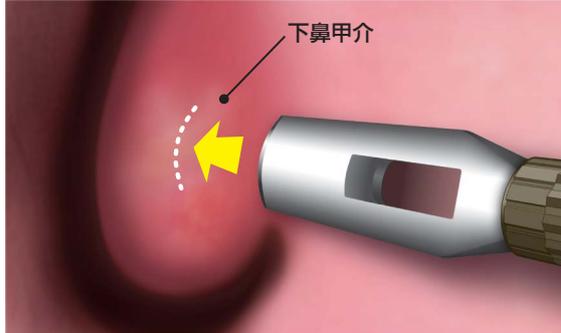


本製品を用いて下鼻甲介の切開を行います。
R形状の刃先は粘膜内のポケット形成や器具の挿入が容易となります。

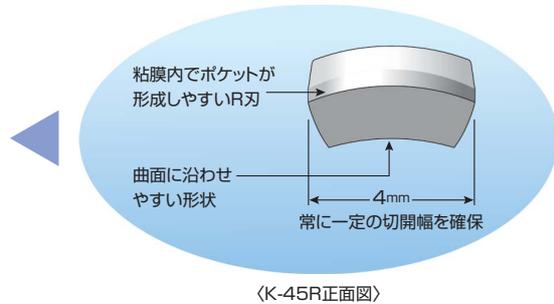


2

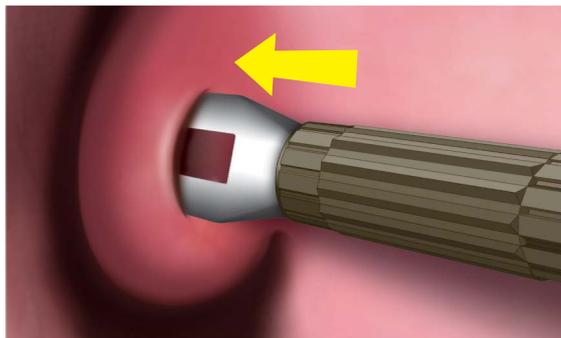


切開後はそのまま下鼻甲介内部へ切り進めます。
剥離子と異なり、刃付けされているため粘膜下組織の切開と剥離がスムーズに行えます。

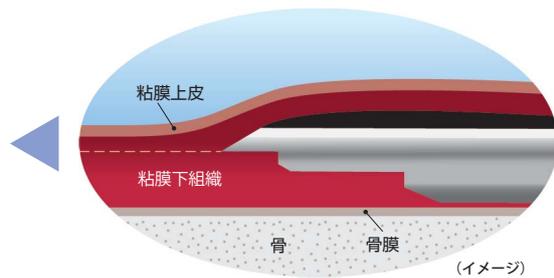

上図のように骨膜に沿わせることで安定的かつ粘膜上皮側への影響を抑えた切開が可能となります。

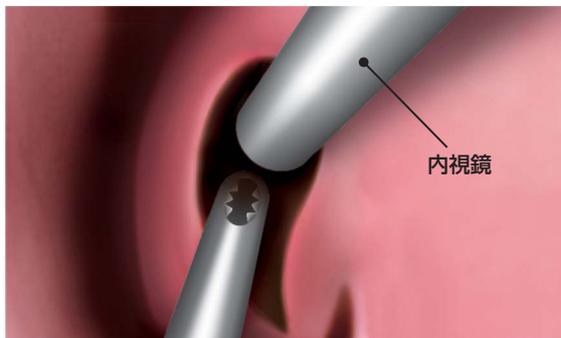

本製品により下鼻甲介内のポケットが広く確保できるため、内視鏡の挿入が容易となります。

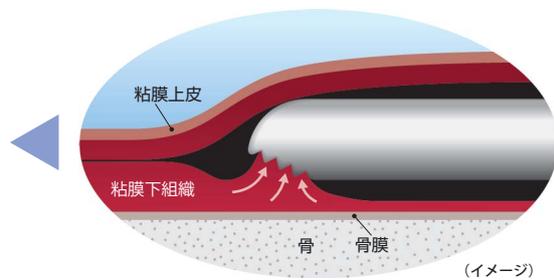

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
———メディカル商品部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



9001:メディカル以外
13485:メディカル