


フェザー® 微細手術用替刃メス

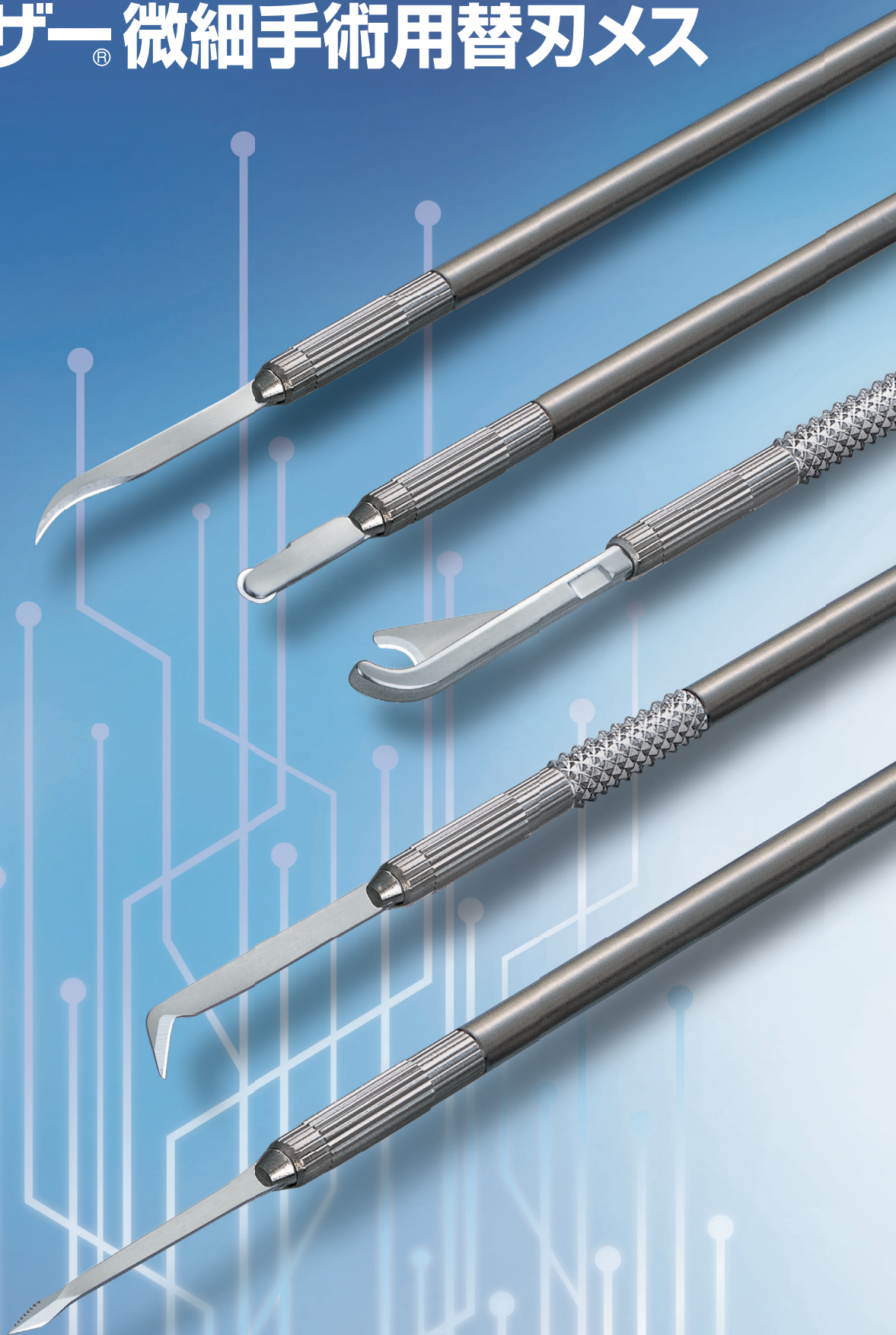

独創性を持ったオリジナルな刃先形状

微細手術用替刃メスは、替刃とハンドルがシステム化された製品です。

刃物に適したステンレス鋼に精密刃付けされた鋭利な刃先と、独創性を持ったオリジナルな形状は、従来のメスにない使いやすさと作業効率を実現させました。

替刃用プラスチックケース




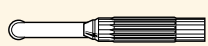
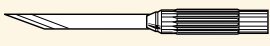

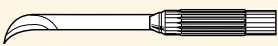
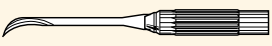
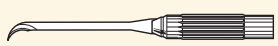

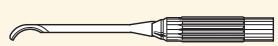

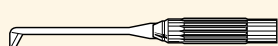
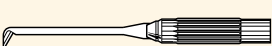
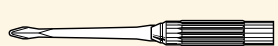

刃先を保護するプラスチックケースに格納され密封包装されています。



扱いやすいハンドル


ハンドルは軽量で扱いやすく、耐久性に優れたチタン合金製です。

微細手術用替刃メス (フェザー微細手術用替刃メス) 製造販売認証番号:219AABZX00133000/管理医療機器

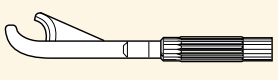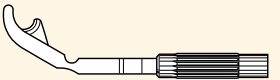〈原寸大〉	〈拡大図〉	〈原寸大〉	〈拡大図〉
K-5100 	刃厚 0.25mm 刃部 ガイド	K-5110 	刃厚 0.25mm 刃部 ガイド
K-5200 	●両面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 2.0mm 0.3mm	K-5210 	●片面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 2.0mm 0.3mm
K-5300 	刃厚 0.38mm 角度 30° 刃部 2.0mm 30°	K-5310 	刃厚 0.38mm 角度 25° 刃部 1.0mm 25°
K-5400 	刃厚 0.38mm 刃部 2.0mm	K-5410 	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm
K-5411 	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm	K-5420 	刃厚 0.38mm 刃先 先端R状 刃部 1.0mm
K-5421 	刃厚 0.38mm 刃先 先端R状 刃部 1.0mm	K-5500 	刃厚 0.38mm 刃部 2.0mm 30°
K-5510 	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm 30°	K-5520 	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm 30°
K-5600 	刃厚 0.38mm 刃部 1.5mm	K-5610 	刃厚 0.38mm 刃先 片面ノコギリ状 刃部 1.5mm


微細手術用替刃メスの主な特長

K-5100 & K-5110

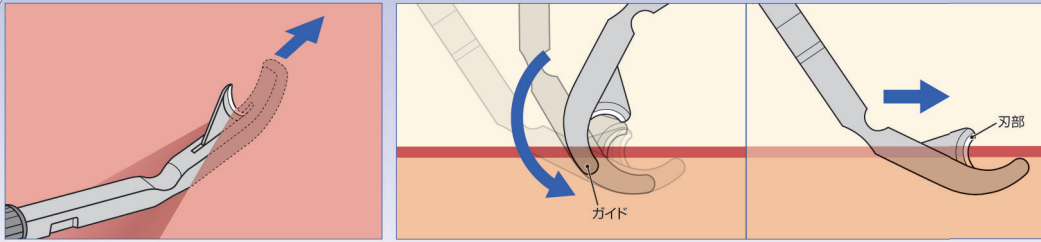


ガイド部と刃部で構成されたK-5100とK-5110は小さな切り口にガイド部を差し込み、押し切る様に使用します。

K-5200 & K-5210

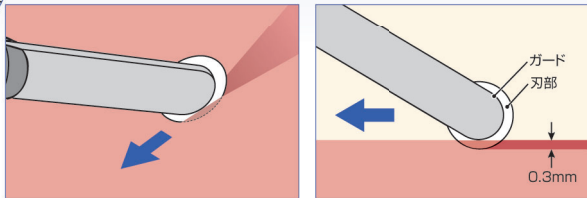

円状メスK-5200、K-5210は軽く押しあてながら切ることができます。刃が深く入りすぎないガード付きです。(強く押しあてると必要以上に刃が深く入りますのでご注意ください。)

K-5610

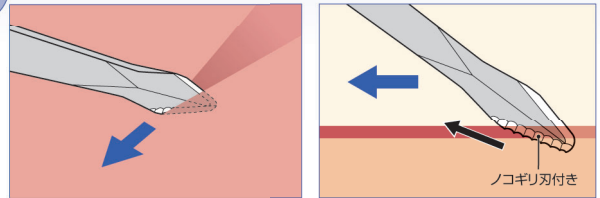


K-5610は矢じり型のメスの片側にノコギリ状の刃が付いています。


●このイラストの製品(K-5100 / K-5110 / K-5200 / K-5210 / K-5610)は当社のオリジナル形状です。

微細手術用替刃メスハンドル (フェザー微細手術用替刃メスハンドル 製造販売届出番号:21B2X10001062004/一般医療機器) (縮尺80%)

■ストレートタイプ

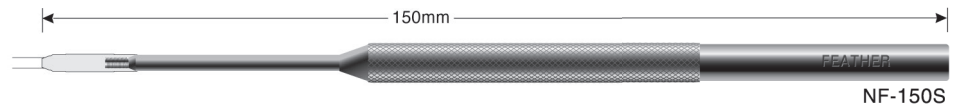


NF-150S

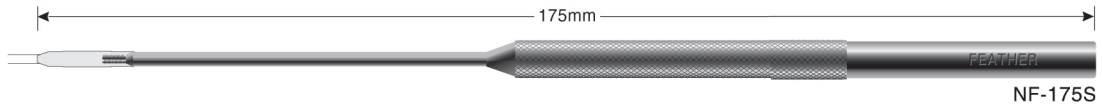


NF-175S


■バヨネットタイプ

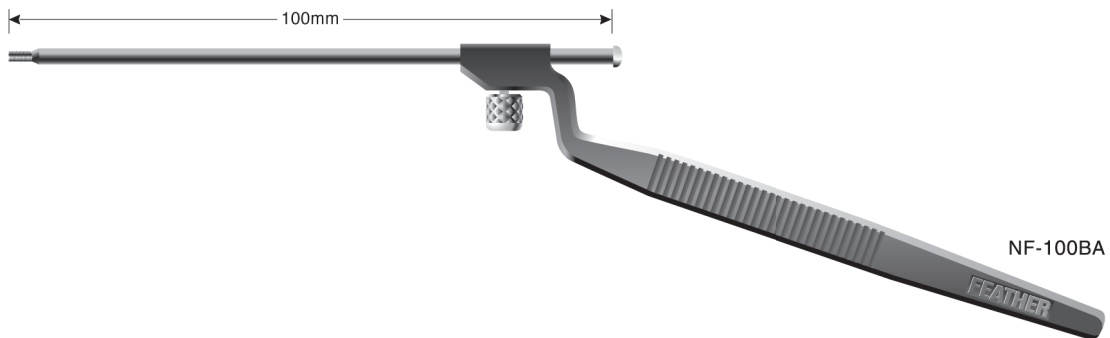

NF-100BA

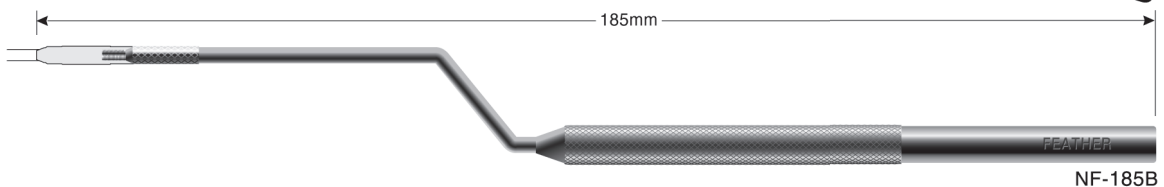


NF-185B

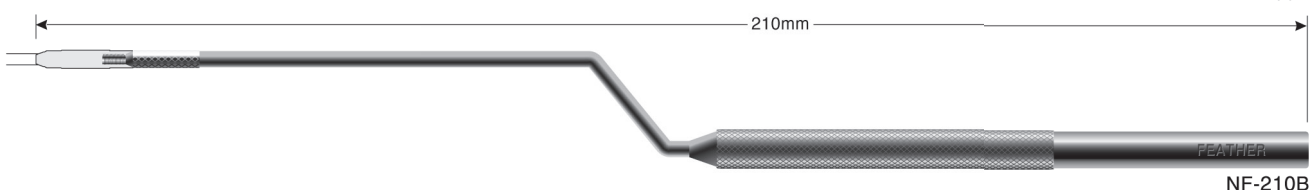


NF-210B

装着方法 (格納はこの逆)

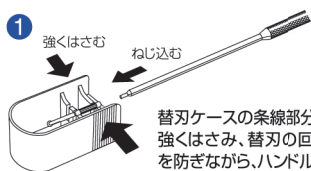

替刃ケースの条線部分を強くはさみ、替刃の回転を防ぎながら、ハンドルの先端を替刃の尾部にねじ込みます。

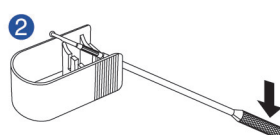


刃先が傷つかぬよう注意しながら、ハンドルを下げ替刃をケースから取り出します。

●NF-150S・NF-175Sの場合



ケースから取り出したあと、更にはっきりとネジを締めこんでください。

●NF-185B・NF-210Bの場合

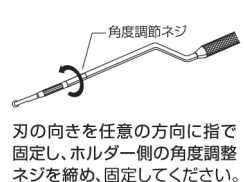

刃の向きを任意の方向に指で固定し、ホルダー側の角度調節ネジを締め、固定してください。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

微細手術用替刃メス

品番	仕様	入数	JANコードナンバー
K-5100	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036090
K-5110			 4 902470 036250
K-5200	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036113
K-5210			 4 902470 036274
K-5300	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036137
K-5310			 4 902470 036199
K-5400	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036151
K-5410			 4 902470 036212
K-5411			 4 902470 046631
K-5420			 4 902470 036298
K-5421			 4 902470 046648
K-5500	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036175
K-5510			 4 902470 036236
K-5520			 4 902470 036311
K-5600	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036335
K-5610		1箱(5コ入)	 4 902470 036359

微細手術用替刃メスハンドル

品番	仕様	入数	JANコードナンバー
NF-150S	チタン合金製 無滅菌	1本(ケース入)	 4 902470 067087
NF-175S			 4 902470 067094
NF-185B	チタン合金製 無滅菌	1本(ケース入)	 4 902470 067100
NF-210B			 4 902470 067117
NF-100BA	チタン合金製 無滅菌	1本(ケース入)	 4 902470 067124

●2023年4月1日現在



フェザー安全剃刀株式会社
———メディカル商品部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



9001:メディカル以外
13485:メディカル