

フェザー® 微細手術用替刃メス



独創性を持ったオリジナルな刃先形状

フェザー「微細手術用替刃メス」は、替刃とハンドルがシステム化された製品です。高品質のステンレス材に超精密刃付けされた鋭利な刃先と、独創性を持ったオリジナルな形状は、従来のメスにない使いやすさと作業効率を実現させました。

ガンマ線滅菌済

ガンマ線で滅菌処理を施していますので、開封してすぐにご使用になれます。

替刃用プラスチックケース

刃先を保護するプラスチックケースに格納され密封包装されています。



扱いやすい専用ハンドル

専用ハンドルはチタン合金製ですから、軽量で扱いやすく、耐久性に優れています。


| 〈原寸大〉 | 〈拡大図〉 | 〈原寸大〉 | 〈拡大図〉 |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| K-5100 | 刃厚 0.25mm 刃部 ガイド | K-5110 | 刃厚 0.25mm 刃部 ガイド |
| K-5200 | ●両面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 | K-5210 | ●片面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 |
| K-5300 | 刃厚 0.38mm 角度 30° 刃部 | K-5310 | 刃厚 0.38mm 角度 25° 刃部 |
| K-5400 | 刃厚 0.38mm 刃部 | K-5410 | 刃厚 0.38mm 刃部 |
| K-5411 | 刃厚 0.38mm 刃部 | K-5420 | 刃厚 0.38mm 刃先 先端円状 刃部 |
| K-5421 | 刃厚 0.38mm 刃先 先端円状 刃部 | K-5500 | 刃厚 0.38mm 刃部 |
| K-5510 | 刃厚 0.38mm 刃部 | K-5520 | 刃厚 0.38mm 刃部 |
| K-5600 | 刃厚 0.38mm 刃部 | K-5610 | 刃厚 0.38mm 刃先 片面/コギリ状 刃部 |

微細手術用替刃メスの特長・効果的な使用例



硬膜に小さな切り口を開け、メスのガイド部を差し込み、刃先が硬膜に直角にあたるようにメスの角度を調節します。

硬膜の一端をピンセットで掴み、テンションをかけ、硬膜を押しながら切ります。(切りづらい場合はメスの角度を再度調節してください。)

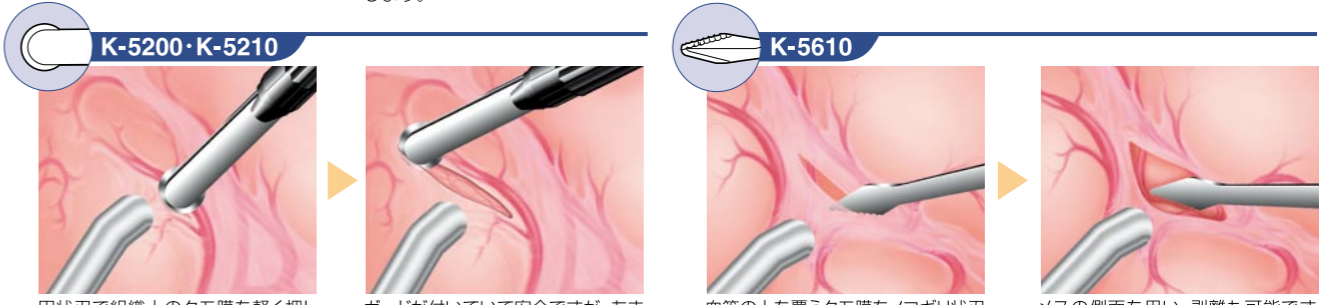

円状刃で組織上のクモ膜を軽く押しながらかちります。(刃の先端が見えにくいときは、片側ガードK-5210が適しています。)

ガードが付いていて安全ですが、あまり強く押し切ると必要以上に刃が深く入ります。徐々に力を入れて切ってください。


血管の上を覆うクモ膜をノコギリ状刃先で引きながら切ることができます。

メスの側面を用い、剥離も可能です。


●このイラストの製品(K-5100 / K-5110 / K-5200 / K-5210 / K-5610)は当社のオリジナル製品です。

専用ハンドル〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉


■ストレートタイプ

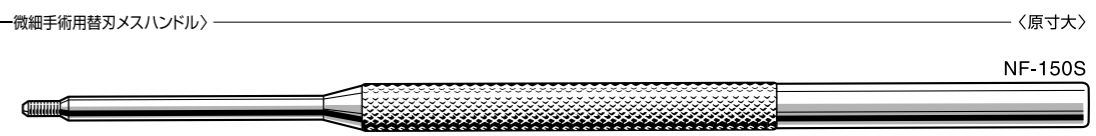

■バヨネットタイプ

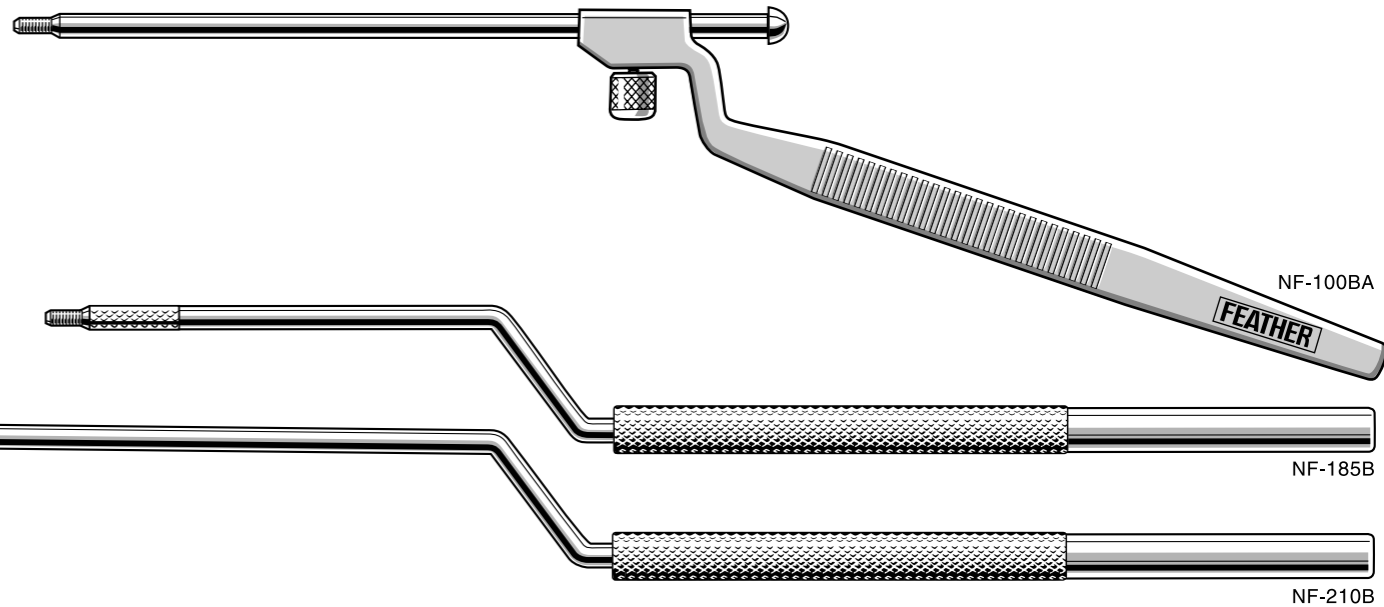

装着方法 (格納はこの逆)

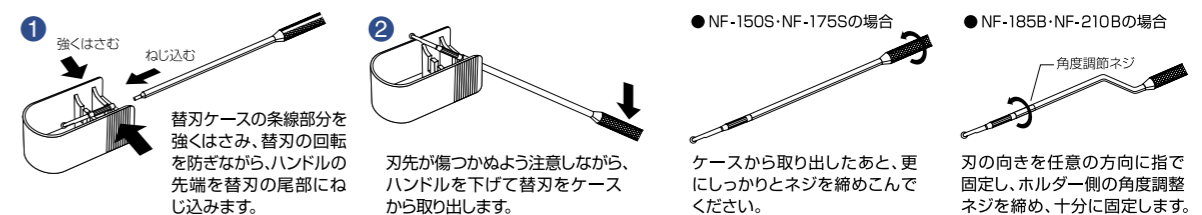

替刃ケースの条線部分を強くはさみ、替刃の回転を防ぎながら、ハンドルの先端を替刃の尾部にねじ込みます。

刃先が傷つかぬよう注意しながら、ハンドルを上げて替刃をケースから取り出します。






●NF-150S・NF-175Sの場合
ケースから取り出したあと、更にはっきりとネジを締めこんでください。

●NF-185B・NF-210Bの場合
刃の向きを任意の方向に指で固定し、ホルダー側の角度調整ネジを締め、十分に固定します。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

| 品番 | 仕様 | 入数 | JANコードナンバー |
|--------|-------------------|---------|--|
| K-5100 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036090 |
| K-5110 | | |  4 902470 036250 |
| K-5200 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036113 |
| K-5210 | | |  4 902470 036274 |
| K-5300 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036137 |
| K-5310 | | |  4 902470 036199 |
| K-5400 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036151 |
| K-5410 | | |  4 902470 036212 |
| K-5411 | | |  4 902470 046631 |
| K-5420 | | |  4 902470 036298 |
| K-5421 | | |  4 902470 046648 |
| K-5500 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036175 |
| K-5510 | | |  4 902470 036236 |
| K-5520 | | |  4 902470 036311 |
| K-5600 | ステンレス製 ガンマ線滅菌済 | 1箱(5コ入) |  4 902470 036335 |
| K-5610 | | 1箱(5コ入) |  4 902470 036359 |

専用ハンドル <フェザー微細手術用替刃メスハンドル> 届出番号 21B2X10001062004 / 一般医療機器

| 品番 | 仕様 | 入数 | JANコードナンバー |
|----------|--------|----------|--|
| NF-150S | チタン合金製 | 1本(ケース入) |  4 902470 067087 |
| NF-175S | | |  4 902470 067094 |
| NF-185B | チタン合金製 | 1本(ケース入) |  4 902470 067100 |
| NF-210B | | |  4 902470 067117 |
| NF-100BA | チタン合金製 | 1本(ケース入) |  4 902470 067124 |

●2011年4月1日現在



フェザー安全剃刀株式会社
— メディカル部 —

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL. 03-3864-0917 FAX. 03-3862-8040

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外
13485:メディカル



対象事業所:製造部門